

Ficha Técnica

Importador

Importador	CNPJ	Insc. Estadual
DBI Comércio e Importação Ltda.	07.295.190/0001-60	117.196.980-110

Produto

Produto	Marca	Modelo
Aspirador e Coagulador Eletrocirúrgico	BluePad	ORL-42

Descrição

O Aspirador e Coagulador Eletrocirúrgico Bluepad é usado para controlar o sangramento usando corrente de alta frequência durante procedimentos eletrocirúrgicos, deve ser acoplado em um gerador de energia . Também se destina a aspirar fluidos do local cirúrgico. Este dispositivo deve ser usado sempre que a coagulação eletrocirúrgica monopolar e a aspiração de fluidos forem desejadas. A coagulação é controlada manualmente pelo botão azul.

O eletrodo é dobrável com uma função auxiliar na sucção de líquido.

O produto é estéril, esterilizado por Óxido de Etileno, e o fabricante recomenda uso único.

Produto látex free.

Especificações e características técnicas do produto

Handle: Comprimento: 121 mm

Cânula: Diâmetro: 3,8 mm / Comprimento: 150 mm

Tubo corrugado de sucção: Comprimento: 300 mm / Diâmetro interno: 8 mm

Cabo conector e plugue: Diâmetro externo: $\phi 2,5\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$ / Comprimento: 3 m $\pm 0,2\text{m}$ com plugue 3 pinos. O botão azul é "COAG".

Eletrodo (modelo #0020S): Diâmetro: 3 mm / Comprimento: 220 mm / Comprimento de operação: 152,91 mm

Composição:

Nome da Parte	Especificação
Eletrodo	Aço Cirúrgico Inoxidável 304
Corpo da Caneta	Resina ABS
Botão	Resina ABS
Placa de circuito	PCB
Cabo	PVC e cobre
Tubo corrugado de sucção	PVC

Instruções de Uso

- Siga todas as instruções de uso fornecidas com o gerador em uso. Examine todos os acessórios e conexões do gerador antes de usá-lo.
- Conecte o Aspirador e Coagulador Eletrocirúrgico Bluepad no receptáculo monopolar do gerador eletrocirúrgico e certifique-se de que o plugue esteja totalmente encaixado no receptáculo.
- Posicione o tubo corrugado de sucção no comprimento desejado, empurrando ou puxando suavemente com os dedos.
- Conecte o tubo corrugado de sucção a uma bomba de sucção.
- Remova a haste de limpeza antes da operação.
- Ajuste o gerador eletrocirúrgico para a configuração de energia apropriada.
- Ative o modo de coagulação pressionando o botão "COAG" na alça. Para sucção, coloque o polegar sobre a abertura de sucção na alça para controlar. A sucção e a coagulação podem ser ativadas simultaneamente.
- O usuário pode dobrar o tubo corrugado de sucção para atender aos requisitos cirúrgicos. Recomenda-se manter a haste de limpeza dentro do tubo até que o tubo de sucção seja dobrado. O ângulo de curvatura recomendado do tubo de sucção não deve exceder 60°. Dobrar novamente pode causar danos.

Inspeção

- ✓ Esses dispositivos devem ser inspecionados antes de cada uso.
- ✓ Examine visualmente os dispositivos para detectar danos físicos, incluindo:
- ✓ Peças plásticas rachadas, quebradas ou distorcidas.
- ✓ Contatos do conector quebrados ou significativamente dobrados.
- ✓ Danos, incluindo cortes, perfurações, cortes, abrasões, protuberâncias incomuns, descoloração significativa.
- ✓ Indicação de danos, corrosão ou desalinhamento.
- ✓ Verifique se o eletrodo está encaixado total e firme na alça antes de usar.

Compatibilidade

É compatível com a maioria dos equipamentos de Eletrocirurgia disponíveis no mercado, que aceite plug 3 pinos.

Embalagem

O Aspirador e coagulador eletrocirúrgico Bluepad é acondicionado individualmente em embalagem de PVC e papel Tyvek. As embalagens individuais são acondicionadas em caixas de papel corrugado de 25 unidades e então em caixa master de papel corrugado contendo 100 peças.

Prazo de Validade

3 anos

Temperatura

-10 a 40°C e umidade de 30 a 75%.

Tributação

NCM	IPI	ICMS
9018.9099	5,2%	Revenda em SP = 18% Revenda fora SP = 4%
Fator de preço		Fator de unidade
Unidade		Unidade

ANVISA

Registro	Validade Registro
80722800023	09/01/2033

Características Gerais

Imagem do Produto



Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
Blister	1 unid	4 x 8 x 32,7cm	7898543890560
Innerbox	25 unid	14 x 34,5 x 33,5cm	17898543890567
Caixa Master	100 unid	39,5 x 67,5 x 36,5cm	27898543890564

Contato / Dúvidas

Nome	Setor	Telefone	E-mail
Alessandra Lima	Qualidade	+55 11 3845-0433	qualidade@dbibrasil.com.br